


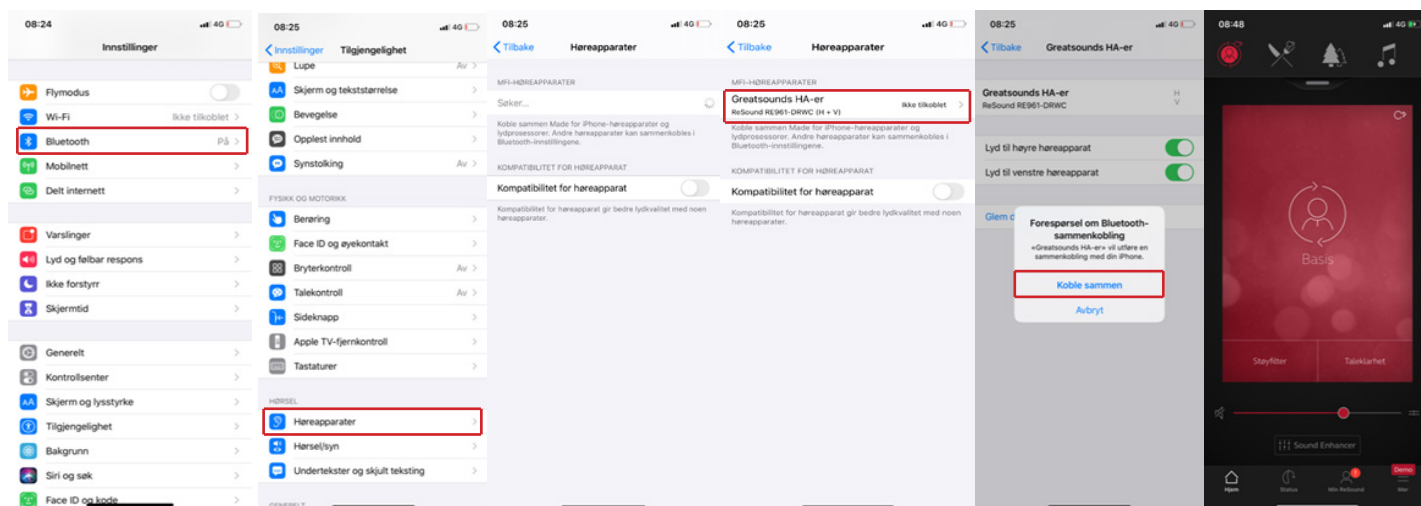
# Slik parer du et Apple-produkt med ditt Høreapparat

ReSound GN

1. **Slå av** dine høreapparater eller plasser de i laderen
2. Lukk alle apper og start telefonen din på nytt
3. Gå til **Innstillinger** på din telefon og **slå på Bluetooth**
4. Gå tilbake til **Innstillinger** og velg deretter **Tilgjengelighet**
5. Rull ned til **Høreapparater** og trykk der
6. **Slå på** dine Høreapparater- Nå vil høreapparatene være i paremodus
7. Hvis du har to høreapparater forsikre deg at det står (H+V) under navnet ditt
8. Trykk på **Koble sammen** (To ganger hvis du har to høreapparat)
9. Dine Høreapparater er nå koblet sammen med din Apple-enhet

## For å bruke høreapparatene sammen med Smart 3D App gjør følgende:

1. Gå til App store 
2. Søk etter ReSound Smart 3D
3. Last ned appen- åpne den og trykk kom i gang
4. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)
5. Du er nå klar for å bruke Smart 3D



## Feilsøking - Mistet kontakt med et eller begge apparater:

1. Lukk alle bakgrunns apper og Restart telefonen.
- Hvis ikke dette hjelper kan du gjøre følgende:
1. Slå av apparatene - Gå til Innstillinger - Tilgjengelighet - Høreapparater - Glem dette høreapparatet.
  2. Slå deretter av og på din telefon, og gjennomfør ny paring (se guide ovenfor).

Se ellers mange nyttige tips på vår Nettside: <https://www.resound.com/nb-no/help/apps/smart-3d>

## Hvilken App skal jeg bruke?

**Smart 3D:** Linx 3D, Enzo 3D, Linx Quattro, Enzo Q. Denne appen er tilgjengelig til de fleste nyere smarttelefoner

**Smart App:** Linx 1-2, samt Enzo 1-2, UP Smart) Høreapparater fra 2014-2017. Tilgjengelig til iPhone og utvalgte Samsung telefoner.

Se komplett liste her: <https://www.resound.com/nb-no/help/compatibility>

GN Making Life Sound Better

# Slik parer du dine Høreapparater med en Android telefon

ReSound GN

1. Slå av eller plasser dine høreapparater i laderen
2. På din telefon gå til Innstillinger og slå på Bluetooth
3. Gå til Google Play og i søkefeltet skriv- ReSound Smart 3D- last ned appen
4. Åpne appen og trykk «kom i gang»
5. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)- Du er nå klar for å bruke Smart 3D



## Feilsøking ved generelle utfordringer med paring mot din Android telefon:

1. Slå av eller plasser høreapparatene i laderen
2. Gå til Bluetooth på telefonen- Forsikre deg om at ingen GN produkter er parert til Bluetooth - Hvis så, trykk Glem disse
3. Slå på Flymodus på telefonen
4. Gå til Innstillinger- Apper- Smart 3D
5. Trykk «Tving stopp»
6. Trykk på lagring og Buffer- Tøm lagring
7. Slå av Flymodus på telefonen
8. Slå på stedstjenester
9. Slå på høreapparatene
10. Åpne Smart 3D appen
11. Trykk på kom i gang
12. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)- Du er nå klar for å bruke Smart 3D

Se ellers mange nyttige tips på vår Nettside:

<https://www.resound.com/nb-no/help/apps/smart-3d>

## Tilgjengelighet

Smart 3D App er kun tilgjengelig på telefoner med Android versjon 7 eller nyere. Direkte streaming av lyd er kun tilgjengelig til utvalgte Android telefoner med følgende spesifikasjoner:

- Android OS versjon 10.0 med ASHA funksjon
- Bluetooth® versjon 5
- Quattro med Firmware versjon 0.43

## Hvilken App skal jeg bruke?

**Smart 3D:** Linx 3D, Enzo 3D, Linx Quattro, Enzo Q. Denne appen er tilgjengelig til de fleste nyere smarttelefoner

**Smart App:** Linx 1-2, samt Enzo 1-2, UP Smart) Høreapparater fra 2014-2017. Tilgjengelig til iPhone og utvalgte Samsung telefoner.

W4Se komplett liste her: <https://www.resound.com/nb-no/help/compatibility>

**GN** Making Life Sound Better