

PhoneNow™

Rôle : Basculer automatiquement sur un programme téléphonique suite à la détection du combiné.

Choix : Désactivé / Activé

Données techniques :

Distance de détection : environ 2 cm


Activation : inférieur à 1 seconde après détection du champ magnétique

Désactivation : 3 à 4 secondes après disparition du champ magnétique

Lorsque le programme PhoneNow est activé, l'appareil recherche en permanence un champ magnétique. Ce champ magnétique peut être émis soit par un combiné téléphonique fixe (par l'aimant du haut-parleur), soit par un petit aimant collé sur le combiné ou le téléphone portable. Une fois le combiné porté à l'oreille, le champ magnétique est détecté par l'appareil et celui-ci bascule sur le programme choisi dans PhoneNow. Ce programme peut être un programme acoustique (les micros de l'appareil sont utilisés) ou magnétique (la bobine T de l'appareil est utilisée).

Comfort Phone™ :

Lorsque la communication inter-appareils est activée et que l'appareil est sur le programme automatique PhoneNow, la fonction Comfort Phone va automatiquement réduire de 6 dB le gain de l'appareil opposé à la conversation téléphonique. Ceci permet à l'utilisateur de se concentrer plus facilement sur la conversation téléphonique.

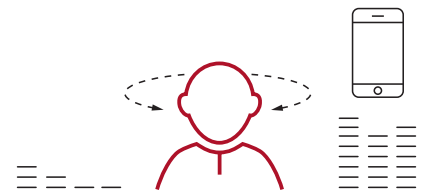

Disponibilité :

Gamme	Choix
LiNX Quattro 9 / 7 / 5 ENZO Q 9 / 7 / 5	PhoneNow avec Comfort Phone
LiNX 3D 9 / 7 / 5 ENZO 3D 9 / 7 / 5	
Ligo 5	
LiNX ² 9 / 7 / 5 ENZO ² 9 / 7 / 5	
Up Smart 9 / 7	