

Så använder du hands-free med iPhone och iPad*

* ReSound ONE hands-free samtal är kompatibelt med iPhone 11 eller senare, iPad Pro 12.9-inch (5:e generationen), iPad Pro 11-inch (3:e generationen), iPad Air (4:e generationen), och iPad mini (6:e generationen), med software uppdatering iOS 15.3 och iPadOS 15.3 eller senare. Se även resound.com/compatibility.

BESVARA ETT SAMTAL


Kort tryckning på **programknappen** på hörapparaten eller svep på iPhone eller iPad skärmen.


AVSLUTA ETT SAMTAL

Lång tryckning på **programknappen** eller tryck på den röda knappen på iPhone eller iPad skärmen.

ANDRA INKOMMANDE SAMTAL

För att besvara eller avsluta ett samtal följ instruktionerna ovan. Vill du avböja? Tryck kort på **programknappen** eller tryck 'Avböj' på iPhone eller iPad skärmen.

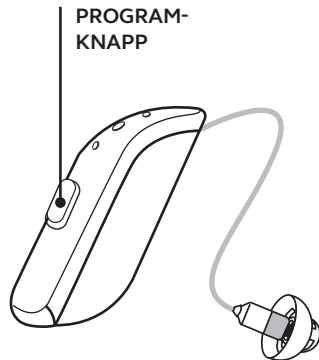

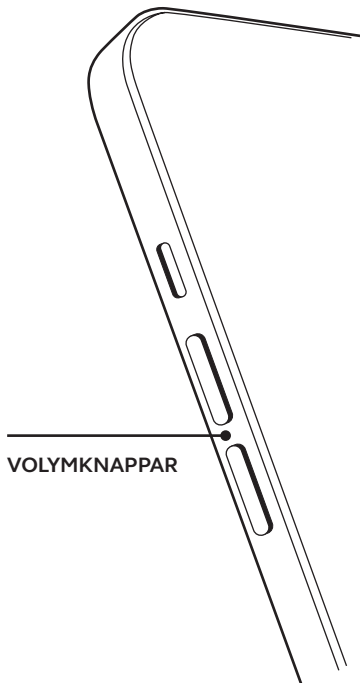

ÄNDRA VOLYMEN

Använd iPhone eller iPadens **volymknapp** för att justera upp eller ned.

SLÅ AV HANDS-FREE SAMTAL I iOS INSTÄLLNINGAR FÖR HÖRAPPARATER

Trippelklicka tryckknappen på iPhone för åtkomst till hörapparatsinställningarna i iOS (åtkomst även via Kontrollcenter). Välj 'mikrofoninmatning' och 'Av'.



Scanna QR-koden för att se instruktionsfilmer

Gå till resound.com för att läsa mer

Worldwide Headquarters

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715