



## Návod na používanie

BeMore app



# Úvod

Aplikácia BeMore bola vytvorená na zlepšenie vášho pocitu z počúvania a na umožnenie čo najlepšieho využitia vašich načúvacích prístrojov BeMore.

Inovačná technológia zvuku a dizajnu sa odráža v celom sortimente načúvacích prístrojov, vďaka čomu je počúvanie ešte príjemnejšie. Načúvacie prístroje sú dostupné výlučne prostredníctvom odborníkov pre starostlivosť o sluch.

Aplikácia BeMore vám umožní ešte lepšie využiť vaše načúvacie prístroje, pretože získate nové možnosti na kontrolu, personalizáciu a podporu.

Aplikácia BeMore je obmenou aplikácie GAN.

Ak si želáte tlačenú verziu tejto používateľskej príručky pre aplikácie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo si ju jednoducho vytlačte.

Ak potrebujete viac informácií alebo pomoc s aplikáciou, poradťte sa so svojím odborníkom pre starostlivosť o sluch alebo navštívte našu webovú stránku: [go.gn.com/app-support](http://go.gn.com/app-support).

## Účel použitia

Aplikácia BeMore je určená na diaľkové ovládanie bezdrôtových načúvacích prístrojov vyrobených spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Aplikácia BeMore je určená na diaľkové ovládanie príslušenstva vyrobeného spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Aplikácia BeMore je určená ako pomocný nástroj pre bezdrôtové načúvacie prístroje vyrobené spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Ked' sa aplikácia používa ako diaľkové ovládanie, môže prispôsobiť načúvací prístroj a/alebo príslušenstvo podľa nastavení, ktoré vybral odborník pre starostlivosť o sluch.

Aplikácia poskytuje používateľovi spojenie s odborníkom pre starostlivosť o sluch, ktorý môže na diaľku prispôsobiť nastavenia načúvacieho prístroja.

## Symboly



**VÝSTRAHA:** Poukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym poraneniam.



Dátum výroby.



**POZOR:** Signalizuje situáciu, ktorá by mohla viesť k malým a stredným poraneniam.



Zdravotnícka pomôcka.



Prečítajte si elektronický návod na používanie.



Unikátna identifikácia pomôcky.



Zákonný výrobca.

# Vyhľadanie a inštalácia aplikácie



Získajte aplikácie pre iPhone, iPad a iPod touch – stiahnite si ich z App Store podľa týchto krokov:

1. Vstúpte do App Store klepnutím na ikonu App Store na zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod touch
2. V App Store vyhľadajte „BeMore“ a názov aplikácie
3. Ak používate iPad, zmeňte kritériá hľadania v ľavom hornom rohu na „iPhone only“ (Len iPhone)
4. Po nájdení aplikácie poklepte na „Get“ (Získať)
5. Potom poklepte „Install“ (Inštalovať)
6. Zadajte platné Apple ID a heslo
7. Po zadaní hesla nájdete aplikáciu na obrazovke svojho zariadenia – aplikáciu otvoríte klepnutím



Získajte aplikácie pre zariadenia s Androidom – stiahnite si ich na Google Play podľa týchto krokov:

1. Chodte na Google Play klepnutím na ikonu Play Store na svojom telefóne s Androidom
2. V Google Play uskutočnite vyhľadávanie pomocou „BeMore“ a názvu aplikácie
3. Po nájdení aplikácie poklepte na „Install“ (Inštalovať)
4. Po zadaní hesla sa aplikácia stiahne a nainštaluje
5. Po dokončení inštalácie aplikáciu spusťte ťuknutím na „Open“ (Otvoriť)

## Aplikácia BeMore



Aplikácia BeMore poskytuje používateľskú ústretovosť len s jedným klepnutím prstom. Ovládajte a prispôsobte si nastavenia načúvacích prístrojov priamo z mobilného zariadenia, aby ste si mohli personalizovať svoje počutie podľa aktuálneho prostredia. Váš odborník pre starostlivosť o sluch môže aktualizovať programy vašich načúvacích prístrojov a môžete dostávať aktualizácie načúvacích prístrojov na diaľku bez toho, aby ste ho museli navštíviť. Aplikácia BeMore vás prevedie všetkým, čo môžete robiť, a tým, ako to robiť.

Aplikácia BeMore je dostupná v App Store a v Google Play.

## Informácie o kompatibilných zariadeniach


Aplikácia je kompatibilná s bezdrôtovými načúvacími prístrojmi a príslušenstvom poskytovaným spoločnosťou GN Hearing A/S.

Úplný zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke [go.gn.com/app-support](http://go.gn.com/app-support).

Zabezpečte, aby boli načúvacie prístroje aktualizované na najnovšiu verziu firmvéru prostredníctvom aplikácie. Firmvér načúvacieho prístroja vám môže aktualizovať váš odborník pre starostlivosť o sluch.

# Funkcie aplikácie BeMore

1. Použite kruhový výber, rozbalovaciu ponuku alebo ťahanie na výber načúvacieho prístroja alebo posluchového programu či obľúbenej položky. Klepnite na rozbalovaciu ponuku pre úpravu programov a obľúbených položiek.
2. Použite rýchle tlačidlá na pokročilé nastavenia zvuku jedným klepnutím.
3. Nastavujte hlasitosť alebo stlmenie.
4. Použite vylepšovač zvuku Sound Enhancer na prispôsobenie výšok/stredov/basov, zníženie hluku, zameranie na reč alebo zníženie hluku z vetra\*. Na prispôsobenie výšok a zvuku z Tinnitus Sound Generator môžete použiť časť Tinnitus Manager, alebo si vybrať prírodný zvuk Nature Sound\*\*.
5. Navigačná ponuka.
6. Ponuka „Moje“:  
Tu sa dozviete, čo aplikácia dokáže, a môžete sa skontaktovať so svojím odborníkom pre starostlivosť o sluch\* na vyžiadanie pomoci a dostávanie aktualizácií pre nastavenia svojich načúvacích prístrojov.
7. Ponuka „Viac“:  
Tu si môžete upraviť nastavenia aplikácie a nájdete tu ďalšie informácie o svojej aplikácii.

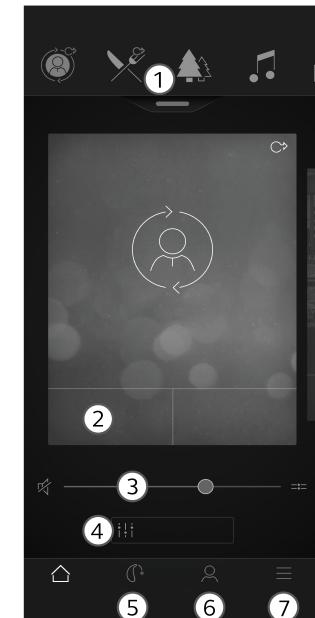

\* Dostupnosť funkcie závisí od modelu načúvacieho prístroja a nastavenia ktoré vykonal váš odborník pre starostlivosť o sluch.

\*\* K dispozícii, ak váš odborník pre starostlivosť o sluch aktivoval funkciu Tinnitus Sound Generator.

# Varovania a bezpečnostné opatrenia

## Používanie s aplikáciami pre mobilné zariadenia

Nevypínajte notifikácie o aktualizáciach pre aplikáciu. Odporuča sa aby ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie pre systém aj aplikáciu pre zabezpečenie funkčnosti a vysokej úrovne ochrany.

Aplikácia sa smie používať iba so zariadeniami BeMore, pre ktoré je určená. BeMore nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak sa aplikácia používa s inými zariadeniami alebo ak sa na ovládanie zariadení BeMore používajú aplikácie tretej strany.

Používajte len balíky jemného doladenia na diaľku ktorých prijatie očakávate.

BeMore nepodporuje upravené (rootnuté) mobilné telefóny.

## Varovania a upozornenia

Ak s načúvacím prístrojom používate aplikáciu, určite si prečítajte používateľskú príručku načúvacieho prístroja. Používateľská príručka načúvacieho prístroja je súčasťou balenia načúvacieho prístroja. Ak potrebujete novú kópiu, poradte sa so svojím odborníkom pre starostlivosť o sluch alebo navštívte našu webovú stránku.

Dbajte na informácie označené výstražným symbolom.



**POZOR:** Vždy používajte najnovšiu aktualizáciu softvéru dostupné pre váš prístroj.

Nerešpektovanie týchto bezpečnostných upozornení môže ohroziť bezpečnosť informácií vášho načúvacieho prístroja a potenciálne spôsobiť stratu sluchu alebo tinnitus.

# Autorské práva

© 2023 GN Hearing A/S. Všetky práva vyhradené. BeMore je ochranná známka spoločnosti GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch a Apple Watch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Logá Android, Google Play a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Výrobca podľa nariadenia EÚ  
2017/745 o zdravotníckych  
pomôckach:

 GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dánsko

 Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, je potrebné nahlásiť zákonnému výrobcovi GN Hearing A/S a príslušnému orgánu členského štátu EÚ, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.  
0297