



Návod na používanie

Interton Sound app

Úvod

Aplikácia Interton Sound bola vytvorená na zlepšenie vášho pocitu z počúvania a na umožnenie čo najlepšieho využitia vašich načúvacích prístrojov Interton.


Inovačná technológia zvuku a dizajnu sa odráža v celom sortimente načúvacích prístrojov, vďaka čomu je počúvanie ešte príjemnejšie. Načúvacie prístroje sú dostupné výlučne prostredníctvom odborníkov pre starostlivosť o sluch.

Aplikácia Interton Sound vám umožní ešte lepšie využiť vaše načúvacie prístroje, pretože získate nové možnosti na kontrolu, personalizáciu a podporu.

Aplikácia Interton je obmenou aplikácie GAN.

Ak si želáte tlačenú verziu tejto používateľskej príručky pre aplikácie, obráťte sa na zákaznícku podporu alebo si ju jednoducho vytlačte.

Ak potrebujete viac informácií alebo pomoc s aplikáciou, poraďte sa so svojim odborníkom pre starostlivosť o sluch alebo navštívte našu webovú stránku: interton.com.

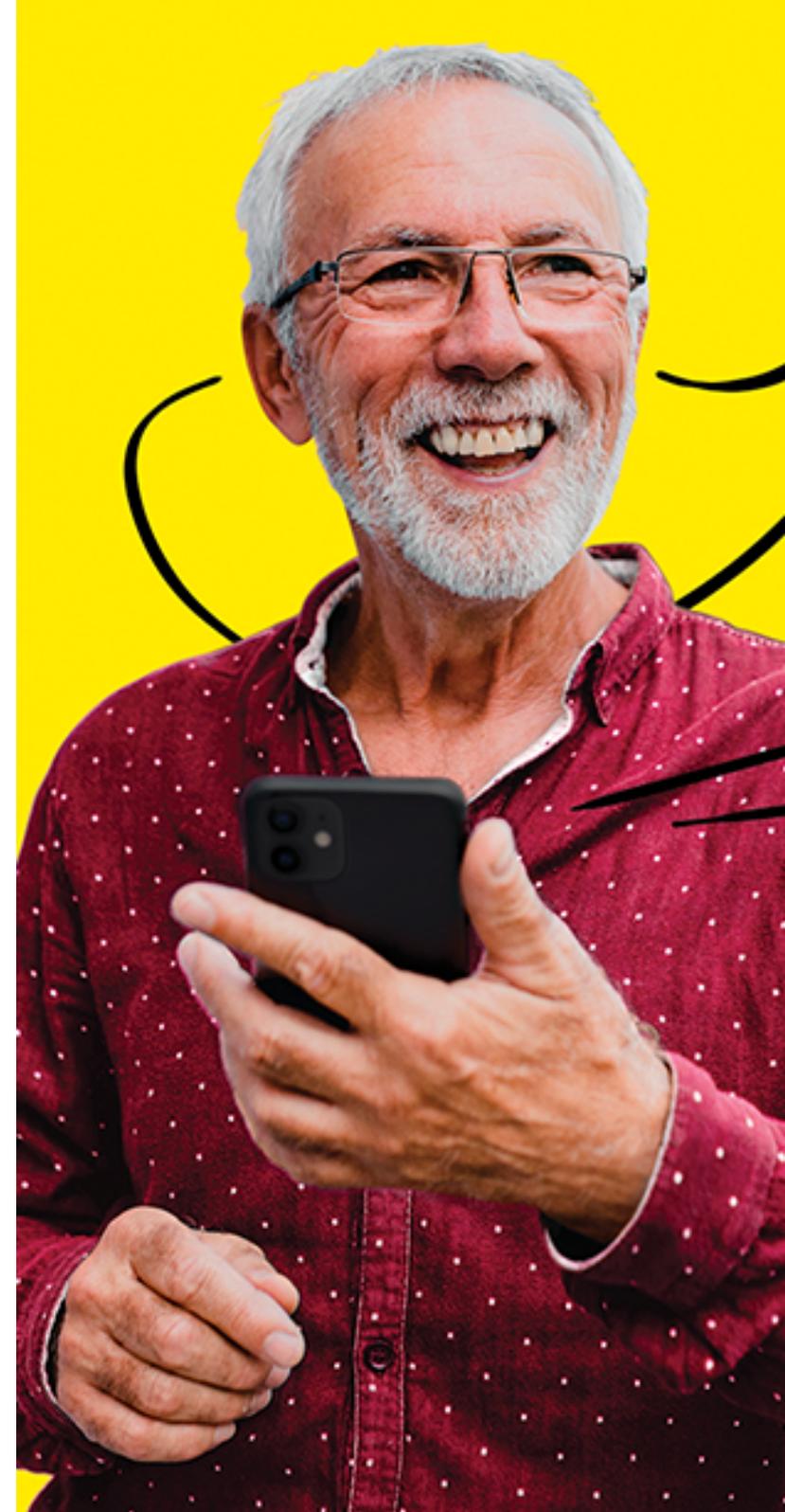

Účel použitia

Aplikácia Interton Sound je určená na diaľkové ovládanie bezdrôtových načúvacích prístrojov vyrobených spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Aplikácia Interton Sound je určená na diaľkové ovládanie príslušenstva vyrobeného spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Aplikácia Interton Sound je určená ako pomocný nástroj pre bezdrôtové načúvacie prístroje vyrobené spoločnosťou GN nezávisle od značky.

Keď sa aplikácia používa ako diaľkové ovládanie, môže prispôbiť načúvací prístroj a/alebo príslušenstvo podľa nastavení, ktoré vybral odborník pre starostlivosť o sluch.

Aplikácia poskytuje používateľovi spojenie s odborníkom pre starostlivosť o sluch, ktorý môže na diaľku prispôbiť nastavenia načúvacieho prístroja.

Symboly



VÝSTRAHA: Poukazuje na situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnym poraneniam.



Dátum výroby.



POZOR: Signalizuje situáciu, ktorá by mohla viesť k malým a stredným poraneniam.



Zdravotnícka pomôcka.



Prečítajte si elektronický návod na používanie.



Unikátna identifikácia pomôcky.



Zákonný výrobca.

Vyhľadanie a inštalácia aplikácie



Získajte aplikácie pre iPhone, iPad a iPod touch – stiahnite si ich z App Store podľa týchto krokov:

1. Vstúpte do App Store klepnutím na ikonu App Store na zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod touch
2. V App Store vyhľadajte „Interton“ a názov aplikácie
3. Ak používate iPad, zmeňte kritériá hľadania v ľavom hornom rohu na „iPhone only“ (Len iPhone)
4. Po nájdení aplikácie poklepte na „Get“ (Získať)
5. Potom poklepte „Install“ (Inštalovať)
6. Zadajte platné Apple ID a heslo
7. Po zadaní hesla nájdete aplikáciu na obrazovke svojho zariadenia – aplikáciu otvoríte klepnutím



Získajte aplikácie pre zariadenia s Androidom – stiahnite si ich na Google Play podľa týchto krokov:

1. Choďte na Google Play klepnutím na ikonu Play Store na svojom telefóne s Androidom
2. V Google Play uskutočnite vyhľadávanie pomocou „Interton“ a názvu aplikácie
3. Po nájdení aplikácie poklepte na „Install“ (Inštalovať)
4. Po zadaní hesla sa aplikácia stiahne a nainštaluje
5. Po dokončení inštalácie aplikáciu spustíte ťuknutím na „Open“ (Otvoriť)

Aplikácia Interton Sound



Aplikácia Interton Sound poskytuje používateľskú ústretovosť len s jedným klepnutím prstom. Ovládajte a prispôbte si nastavenia načúvacích prístrojov priamo z mobilného zariadenia, aby ste si mohli personalizovať svoje počutie podľa aktuálneho prostredia. Váš odborník pre starostlivosť o sluch môže aktualizovať programy vašich načúvacích prístrojov a môžete dostávať aktualizácie načúvacích prístrojov na diaľku bez toho, aby ste ho museli navštíviť. Aplikácia Interton Sound vás prevedie všetkým, čo môžete robiť, a tým, ako to robiť.

Aplikácia Interton Sound je dostupná v App Store a v Google Play.

Informácie o kompatibilných zariadeniach

Aplikácia je kompatibilná s bezdrôtovými načúvacími prístrojmi a príslušenstvom poskytovaným spoločnosťou Interton A/S.

Úplný zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke [interton.com](https://www.interton.com).


Zabezpečte, aby boli načúvacie prístroje aktualizované na najnovšiu verziu firmvéru prostredníctvom aplikácie. Firmvér načúvacieho prístroja vám môže aktualizovať váš odborník pre starostlivosť o sluch.

Funkcie aplikácie Interton Sound

1. Použite kruhový výber, rozbaľovaciu ponuku alebo ťahanie na výber načúvacieho prístroja alebo posluchového programu či obľúbenej položky. Klepnite na rozbaľovaciu ponuku pre úpravu programov a obľúbených položiek.
2. Použite rýchle tlačidlá na pokročilé nastavenia zvuku jedným klepnutím.
3. Nastavujte hlasitosť alebo stlmenie.
4. Použite vylepšovač zvuku Sound Enhancer na prispôsobenie výšok/stredov/basov, zníženie hluku, zameranie na reč alebo zníženie hluku z vetra*. Na prispôsobenie výšok a zvuku z Tinnitus Sound Generator môžete použiť časť Tinnitus Manager, alebo si vybrať prírodný zvuk Nature Sound**.
5. Navigačná ponuka.
6. Ponuka „Moje“:
Tu sa dozviete, čo aplikácia dokáže, a môžete sa skontaktovať so svojim odborníkom pre starostlivosť o sluch* na vyžiadanie pomoci a dostávanie aktualizácií pre nastavenia svojich načúvacích prístrojov.
7. Ponuka „Viac“:
Tu si môžete upraviť nastavenia aplikácie a nájdete tu ďalšie informácie o svojej aplikácii.

* Dostupnosť funkcie závisí od modelu načúvacieho prístroja a nastavenia ktoré vykonal váš odborník pre starostlivosť o sluch.

** K dispozícii, ak váš odborník pre starostlivosť o sluch aktivoval funkciu Tinnitus Sound Generator.

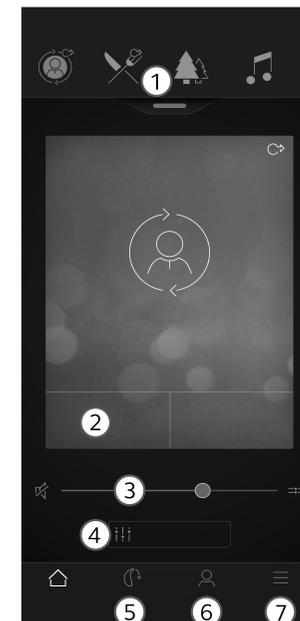

Varovania a bezpečnostné opatrenia

Používanie s aplikáciami pre mobilné zariadenia

Nevypínajte notifikácie o aktualizáciách pre aplikáciu. Odporúča sa aby ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie pre systém aj aplikáciu pre zabezpečenie funkčnosti a vysokej úrovne ochrany.

Aplikácia sa smie používať iba so zariadeniami Interton, pre ktoré je určená. Interton nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak sa aplikácia používa s inými zariadeniami alebo ak sa na ovládanie zariadení Interton používajú aplikácie tretej strany.

Používajte len balíky jemného doladenia na diaľku ktorých prijatie očakávate.

Interton nepodporuje upravené (rootnuté) mobilné telefóny.

Varovania a upozornenia

Ak s načúvacím prístrojom používate aplikáciu, určite si prečítajte používateľskú príručku načúvacieho prístroja. Používateľská príručka načúvacieho prístroja je súčasťou balenia načúvacieho prístroja. Ak potrebujete novú kópiu, poraďte sa so svojim odborníkom pre starostlivosť o sluch alebo navštívte našu webovú stránku.

Dbajte na informácie označené výstražným symbolom.



POZOR: Vždy používajte najnovšiu aktualizáciu softvéru dostupné pre váš prístroj.

Nerešpektovanie týchto bezpečnostných upozornení môže ohroziť bezpečnosť informácií vášho načúvacieho prístroja a potenciálne spôsobiť stratu sluchu alebo tinnitus.

Autorské práva

© 2023 GN Hearing A/S. Všetky práva vyhradené. Interton je ochranná známka spoločnosti GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch a Apple Watch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Logá Android, Google Play a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Interton GN

Výrobca podľa nariadenia EÚ
2017/745 o zdravotníckych
pomôckach:

 Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dánsko
interton.com

 Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, je potrebné nahlásiť zákonnému výrobcovi Interton A/S a príslušnému orgánu
0297 členského štátu EÚ, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.