

DANAVOX GN

Made for

 iPhone | iPad | iPod

Works with

android 

XA RIE RHI

# Danavox Barani Brugsanvisning

RIE høreapparater, genopladelige

**GN** Making Life Sound Better

# Oplysninger om høreapparat

Venstre høreapparat		Højre høreapparat	
Serienummer		Serienummer	
Modelnummer		Modelnummer	

Kuppel-/protype	<b>Åben kuppel</b> <input type="checkbox"/> Lille <input type="checkbox"/> Mellem <input type="checkbox"/> Stor	<b>Power kuppel</b> <input type="checkbox"/> Lille <input type="checkbox"/> Mellem <input type="checkbox"/> Stor	<input type="checkbox"/> Plus	<input type="checkbox"/> RIE prop
-----------------	--	---	-------------------------------	-----------------------------------

Program	Bip	Beskrivelse
1	Et bip	
2	To bip	
3	Tre bip	
4	Fire bip	

# Indholdsfortegnelse

Introduktion .....	5
Dit høreapparat .....	6
Sådan bliver dine høreapparater klar til brug .....	9
Sådan sætter du høreapparaterne i dine ører .....	16
Sådan fjerner du høreapparaterne fra dine ører .....	19
Sådan bruger du dine høreapparater .....	21
Avancerede løsninger .....	24
Sådan rengør og vedligeholder du dine høreapparater .....	32
Trådløst tilbehør .....	37
Tinnitus-håndtering .....	38
Generelle advarsler .....	46
Fejlfinding .....	49
Advarsler til høreapparatspecialister (kun USA) .....	53
Regulatoriske oplysninger .....	55
Tekniske specifikationer .....	59
Varianter af høreapparater .....	63
Ekstra oplysninger .....	64



# Introduktion

Tak, fordi du vælger vores høreapparater. Vi anbefaler, at du bruger dine høreapparater dagligt. På den måde kan du få det fulde udbytte af dem.

**BEMÆRK: Læs dette hæfte grundigt, før du tager dine nye høreapparater i brug.**

## Anvendelsesformål



Generelle luftledningshøreapparater er lydforstærkende enheder, der er beregnet til at kompensere for nedsat hørelse. Det grundlæggende princip bag høreapparater er at modtage, forstærke og overføre lyd til trommehinden hos en person med nedsat hørelse.

### For apparater med et Tinnitus Sound Generator modul

Tinnitus Sound Generator modulet er et værktøj til at generere lyde, der skal anvendes som led i et tinnitusbehandlingsprogram til at give midlertidig lindring hos patienter, der lider af tinnitus. Målgruppen er primært voksne personer over 18 år. Produktet kan også bruges af børn i alderen 12 år og opefter.

# Dit høreapparat

1. Receiverledning
2. Receiver-
3. Kuppel (en åben kuppel er vist)
4. Trykknop
5. LED (grønt lys)
6. Mikrofonindgange
7. Venstre/højre indikator
8. Serienummer og model

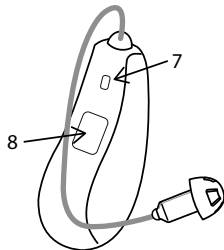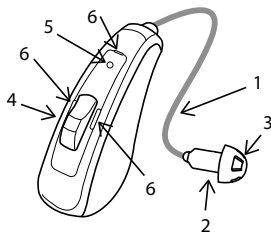

## Domes and earmoulds



Power kuppel



Pluskuppel



Custom prop



## Sports lock

The sports lock has been created to help keep the hearing aids in place for people with an active lifestyle.



## Opladeren

1. Opladningsholder til høreapparat
2. Receiverholder
3. Batteriindikator for høreapparat
4. Indikator for venstre høreapparat (blå)
5. Indikator for højre høreapparat (rød)
6. Batteriindikator på oplader
7. Opladningskabel
8. Port til opladningskabel (micro-USB)

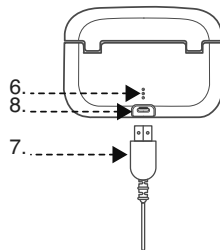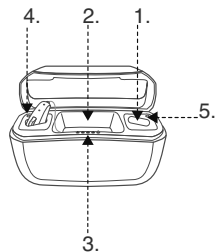




# Sådan bliver dine høreapparater klar til brug

## Opladning af opladeren

Sæt den medfølgende strømadapter i en stikkontakt, og sæt opladerkablet i høreapparatopladeren.

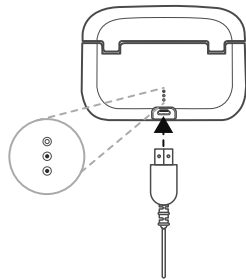

De tre LED'er bagpå opladeren viser høreapparatopladerens batteriniveau. En blinkende LED viser, at opladerens batteriniveau er lavt. Opladeren skal i så fald oplades. Tre grønne LED'er viser, at den er fuldt opladet.

Når høreapparatopladeren er fuldt opladet, har den kapacitet til mindst 3 komplette høreapparatopladninger, før den skal sættes i stikkontakten og genoplades.

LED'er	Batteriniveau
●	En blinkende LED angiver, at der er mindre end 10 % strøm tilbage.
●	10-33 % opladet
● ●	33-66 % opladet
● ● ●	66-100 % opladet



**FORSIGTIG:** Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at du kun bruger den oplader, der følger med dine høreapparater.




**NOTE:**


- Når du oplader høreapparatopladeren første gang, skal du oplade den i mindst 3 timer, også selvom LED-indikatoren viser, at batteriet er helt opladet.
- Det sikreste er at lade opladeren stå tilsluttet natten over – hverken batterierne i høreapparatopladeren eller i høreapparaterne kan overoplades.

## Opladning af høreapparaterne

1. Sæt den medfølgende strømadapter i en stikkontakt, og sæt opladerkablet i høreapparatopladeren.

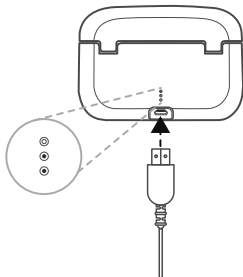

2. Læg høreapparaterne i holderne i opladeren. Anbring det højre høreapparat i holderen med den røde prik og det venstre i holderen med den blå prik. Anbring receiverne i receiverholderne. Hvis receiverne er udstyret med en sportslås, skal du være forsigtig, når du anbringer høreapparaterne.

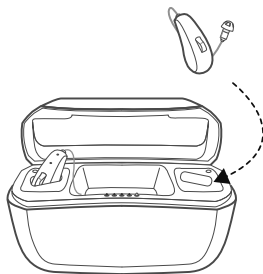


**NOTE:** Vi anbefaler, at du lader dine høreapparater helt op, inden du bruger dem.




**NOTE:** Sørg for, at høreapparaterne er tørre, før de sættes i opladeren.

1. Under opladningen blinker LED'en på høreapparaterne langsomt, indtil de er helt opladet

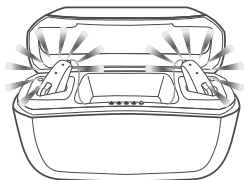


2. Når høreapparaterne er helt opladet, lyser LED'en konstant, indtil høreapparaterne tages ud af opladeren

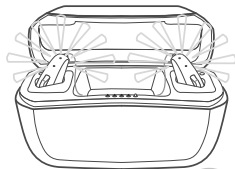

De fem LED'er foran på opladeren viser høreapparaternes opladningsniveau. Når du anbringer eller fjerner høreapparaterne fra opladeren, angiver LED'erne batteriets status i 10 sekunder. LED'erne på opladeren viser batteriets status under opladningen. Når høreapparaterne isættes og udtages, viser LED'erne batteriniveauet på det høreapparat, der har det laveste batteriniveau.

Det tager tre timer at lade høreapparaterne helt op.

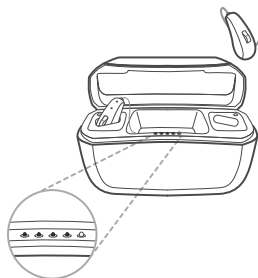

#### Batteriindikatorer for høreapparat

LED'er	Niveau
●	0-20 %
●●	20-40 %
●●●	40-60 %
●●●●	60-80 %
●●●●●	80-100 %

#### Batteriadvarsler

- Forsøg ikke at åbne batteriet eller udskifte det. Det medfører, at garantien bortfalder.
- Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes. Brug af andre batterier kan indebære en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding. Genopladelige batterier skal bortskaffes iht. lokale regler. Indlever til genbrug, når det er muligt. Smid ikke det genopladelige produkt ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forsøg heller ikke at brænde det, da der er risiko for, at det kan eksplodere.

- Batterier er skadelige for miljøet. Du må derfor ikke forsøge at brænde dem. Bortskaf dem i henhold til lokale regler, eller indlever dem til din høreapparatspecialist.
- Lithium-ion-batterier må aldrig sluges eller placeres i nogen del af kroppen, da dette kan medføre dødsfald inden for to timer eller derunder. Hvis et lithium-ion-batteri sluges eller placeres i en del af kroppen, eller hvis et genopladeligt høreapparat sluges, skal du straks søge lægehjælp.
- Hvis det genopladelige høreapparats ydre kabinet er ødelagt, kan de genopladelige batterier begynde at lække. Hvis det er tilfældet, må høreapparatet ikke benyttes – kontakt din høreapparatspecialist.
- Batterilækage kan forårsage kemiske forbrændinger. Hvis du udsættes for batterilækage, skylles straks efter med varmt vand. Hvis du får kemiske forbrændinger, rødme eller hudirritation som følge af batterilækage, skal du søge læge øjeblikkeligt.
- Batterier er skadelige for miljøet. Du må derfor ikke forsøge at brænde dem. Bortskaf dem i henhold til lokale regler, eller indlever dem til din høreapparatspecialist.
- Når du rejser, skal du kontakte flyselskabet for at høre om regler for transport af dit høreapparat og din oplader.

### **Advarsler om oplader**

1. Når du tager stikket ud af stikkontakten, så tag fat i stikket og ikke i ledningen.
2. Brug aldrig en beskadiget oplader. En beskadiget eller forkert samlet oplader kan forårsage elektrisk stød eller brand, når produktet bruges efterfølgende
3. Forsøg aldrig af åbne eller skille opladeren ad, da det kan udsætte dig for farligt elektrisk stød og vil få garantien til at bortfalde
4. Undgå at oplade dit produktet i ekstremt høje eller lave temperaturer, og brug ikke opladeren udenfor eller i fugtige omgivelser



5. Undgå at oplade dit produkt i ekstremt høje eller lave temperaturer, og brug ikke opladeren udenfor eller i fugtige omgivelser
6. Du må ikke bruge silica gel eller lignende produkter til at tørre opladeren eller høreapparaterne
  - Din høreapparatoplader indeholder et li-ion-batteri.
  - Når du rejser, skal du kontakte flyselskabet for at høre om regler for transport af dit høreapparat og din oplader.

## Advarsel om lavt batteriniveau

Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, reduceres lydstyrken i høreapparaterne, en melodi afspilles hvert 15. minut, indtil de er fuldstændig afladede.

## Indikator for lav batterispænding under parring med trådløst udstyr (ekstraudstyr)

Batterierne løber hurtigere tør for strøm, når du bruger trådløs funktionalitet som f.eks. direkte streaming fra din smartphone eller streaming fra dit tv med vores TV Streamer. I tabellen nedenfor vises, hvordan funktionaliteten ændres i takt med batteriniveauet.

Batteriniveau	Signal	Høreapparat	Fjernbetjening	Streaming
Fuldt opladet		✓	✓	✓
Lav		✓	✓	x
Afladet (skift batteri)		✓	x	x

Du kan tjekke batteriets status ved at lægge høreapparatet i høreapparatopladeren.

# Sådan sætter du høreapparaterne i dine ører

## Sådan kan du kende forskel på højre og venstre apparat




Hvis du har to høreapparater, kan de være programmeret forskelligt. Ét til dit venstre øre, det andet til dit højre øre. Byt ikke om på dem. Vær opmærksom på dette når du rengør, opbevarer og indsætter høreapparaterne.

Du kan eventuelt bede din høreapparatspecialist om at farvemarkere dine høreapparater, så du kan kende forskel på højre og venstre: Venstre er blå og højre er rødt.



## Sådan sættes øreproppen i

1. Hold proppen mellem tommel- og pegefinger, og placer spidsen i din øregang.
2. Skub øreproppen hele vejen ind i øret med en blid, vridende bevægelse. Bevæg øreproppen op og ned og tryk forsigtigt på den for at placere den korrekt i øret. Det kan være lettere at sætte øreproppen i, hvis du åbner og lukker munden.
3. Anbring høreapparatet bag dit øre, og sørg for, at det sidder godt fast. Det kan være, du finder en lettere metode ved at eksperimentere dig frem. Hvis høreapparatet sidder korrekt, sidder det til, men er alligevel bekvemt at have på.

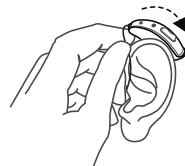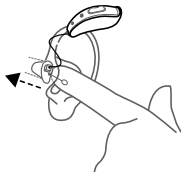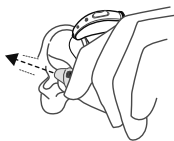

**NOTE:** Det kan være nyttigt at trække øret op og ud med din anden hånd under indføring.



**FORSIGTIG:** Du må ikke selv forsøge at ændre formen på høreapparaterne, ørepropperne eller .

## Sportslås

Hvis du har en aktiv livsstil, kan høreapparaterne løsne sig. For at undgå denne situation kan din høreapparatspecialist montere og justere en sportslås på receiveren.



Sådan sætter du et høreapparat med en sportslås i:

1. Sæt høreapparatet i som normalt
2. Tryk sportslåsen ind nederst i øresneglen.





**NOTE:** Sportslåse kan blive stive, skøre eller misfarvede med tiden. Kontakt din høreapparatspecialist for at få en ny.

# Sådan fjerner du høreapparaterne fra dine ører



## Sådan fjerner du receiverkuplen fra øret

1. Tag høreapparatet af øret.
2. Hold receiverslangen mellem tommel- og pegefinger, hvor den bøjer, og træk receiverkuplen ud af øregangen.

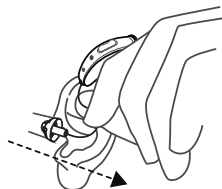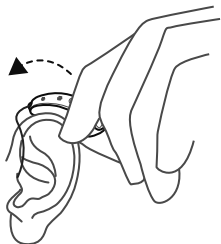

## Sådan fjerner du øreproppen fra dit øre

1. Tag høreapparatet af øret. Lad det hænge ved siden af øret et øjeblik.
2. Brug tommel- og pegefingeren til forsigtigt at trække øreproppen (ikke apparatet eller slangen) løs fra øret. Hvis øreproppen har en udtrækningsssnor, skal du benytte den. Tag øreproppen helt af ved forsigtigt at dreje den.

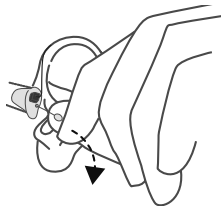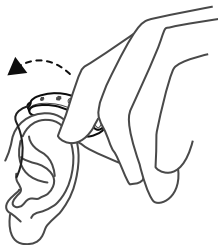

# Sådan bruger du dine høreapparater

## Tænd/sluk høreapparaterne

Høreapparaterne tændes automatisk, når de tages ud af høreapparatopladeren. De kan også tændes og slukkes manuelt ved at trykke på programvælgeren.

1. Tryk på knappen i 5 sekunder for at tænde.
2. Tryk på knappen i 5 sekunder for at slukke.



### NOTE:

Når høreapparaterne tændes, lyser LED'en op. Når høreapparaterne slukkes, blinker LED'en tre gange.

Hvis opladeren ikke er forbundet til en stikkontakt, slukker høreapparaterne efter 24 timer. Hvis opladeren er løbet tør for strøm, vil høreapparaterne blive slukket, og du vil skulle tænde for høreapparaterne manuelt ved at trykke på programvælgeren i 5 sekunder.


## Trykknappen

Trykknappen giver adgang til funktioner, som dig og din høreapparatspecialist i fællesskab beslutter at anvende på dit høreapparat. Trykknappen lader dig bruge fire forskellige lytteprogrammer og tre programmer til trådløst tilbehør som standard.

- Tryk kort på trykknappen (bip) for at skifte mellem programmer. Du hører derefter et eller flere bip. Antallet af bip angiver, hvilket program du har valgt
- Tryk og hold nede i 1 sekund (kort melodi) for at aktivere streaming. Hvis dine høreapparater er blevet parret med mere end én trådløs enhed, vil tryk i ét sekund mere skifte til den næste enhed. Et kort tryk afslutter streaming og starter det program, du forlod
- Du kan tænde og slukke for høreapparatet ved at trykke og holde nede i 5 sekunder

Når høreapparaterne slukkes og derefter tændes igen, vender de altid tilbage til standardindstillingen (program et og forudindstillet lydstyrke).

Din høreapparatspecialist kan konfigurere trykknappen så du også kan bruge den til at styre lydstyrken og skifte mellem lytteprogrammer.

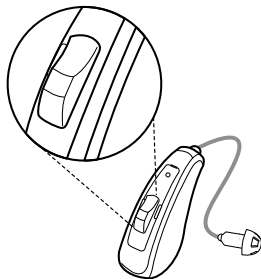

Om nødvendigt kan du få din høreapparatspecialist til at ændre standardindstillingerne for programvælgeren og udfylde følgende skema med de nye indstillinger:

Handling	Standardindstilling	Ny indstilling	Ny indstilling
Kort tryk	Skift af program		
Tryk i 1 sek.	Aktiverer streaming		



**NOTE:**

- Visse funktioner kan konfigureres under tilpasningssessionen. Spørg din høreapparatspecialist til råds om de indstillinger, der er bedst for dig.
- For at gøre tingene nemmere kan du styre dine høreapparater fra BeMore appen eller Remote Control 2.

# Avancerede løsninger

## Telefonering

Høreapparatet giver dig mulighed for at bruge telefonen, som du normalt gør. Det kan kræve lidt øvelse at finde den bedst mulige position at holde telefonrøret i.


Et eller flere af disse forslag kan være til hjælp:

1. Afhængigt af din tilpasning og hørestatus skal du enten holde telefonen op til din øregang eller holde den tæt på høreapparatets mikrofoner som vist
2. Hvis der opstår hyletoner, så prøv at holde telefonen i samme stilling i nogle sekunder, så kan høreapparatet måske afhjælpe tilbagekoblingen
3. Hyletonerne holder muligvis op, hvis du holder telefonen lidt længere væk fra øret



### NOTE:

- Din høreapparatspecialist kan, afhængigt af dine behov, aktivere et program til telefonbrug.
- Hvis du har en mobilenhed, kan du parre den for at oprette direkte forbindelse til dine høreapparater. Se "Avancerede løsninger", side 24.

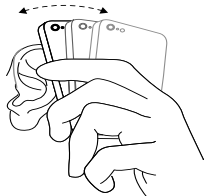



## Mobiltelefoner

Dine høreapparater er i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Enhver grad af forstyrrelser kan skyldes den enkelte mobiltelefon eller udbyderen af trådløs telefoni.



**NOTE:** Hvis du har svært ved at opnå et godt resultat, mens du bruger din mobiltelefon, kan din høreapparatspecialist give dig gode råd om trådløst tilbehør, der kan forbedre dine muligheder for at benytte mobiltelefonen.

## Sådan bruger du høreapparaterne sammen med iPhone, iPad og iPod touch (ekstraudstyr)

Dine høreapparater er Made for iPhone, iPad og iPod touch, hvilket tillader direkte lydstreaming og betjening fra disse enheder.

## Streaming fra en Android™ smartphone

Du kan streame lyd direkte til dine høreapparater med visse Android smartphones. Din enhed skal køre Android 10 eller nyere og have funktionen Android Streaming for Hearing Aids.



**NOTE:** Du kan få hjælp til at oprette parring og benytte disse produkter sammen med dine høreapparater ved at kontakte din høreapparatspecialist.

## Brug af dine høreapparater sammen med smartphone-apps (ekstraudstyr)

Vores smartphone-apps er beregnet til at blive brugt sammen med vores trådløse høreapparater. Smartphone-apps sender og modtager signaler fra trådløse høreapparater via smartphones.

- Du må ikke deaktivere appnotifikationer
- Installér opdateringer, så appen fortsat fungerer korrekt
- Brug kun appen sammen med høreapparater fra den samme producent. Vi påtager os intet ansvar, hvis appen bruges sammen med andre høreapparater
- Hvis du gerne vil have en trykt version af brugsanvisningen til en smartphone-app, kan du gå ind på vores websted eller kontakte kundesupport



**NOTE:** Du kan få hjælp til at oprette parring og benytte disse produkter sammen med dine høreapparater ved at kontakte din høreapparatspecialist eller besøge vores supportwebsted.



**NOTE:** Hvis din Android smartphone med Bluetooth® ikke streamer direkte til dine høreapparater, kan du besvare telefonen, hvis du bruger Phone Clip+.

## Online Services (ekstraudstyr)

Hvis du har tilmeldt dig brugen af Online Services, der er tilgængelig på dine høreapparater, kan du få dine høreapparater fjernindstillet, uden at du behøver at besøge din høreapparatspecialist.

Du skal blot have en kompatibel mobilenhed med internetforbindelse. Det giver dig uovertruffen frihed og fleksibilitet:

- Bed om hjælp til at fjerntilpasse dine høreapparater, så de passer bedre til dig.
- Hold dine høreapparater opdateret med den nyeste software for at sikre den bedst mulige ydeevne.

Denne service fungerer kun, hvis din mobilenhed har forbindelse til internettet. Din høreapparatspecialist vil med glæde give dig yderligere oplysninger om denne mulighed, og om hvordan den fungerer sammen med appen BeMore.

Du sikrer optimal ydeevne ved at sørge for, at høreapparaterne er forbundet til BeMore appen og placeret tæt på din iPhone, iPad, iPod touch eller Android™ smartphone, før du udfører ændringerne.



**NOTE:** Dine høreapparater vil lukke ned under installations- og opdateringsprocessen.



## Phone Now (ekstraudstyr)

Hvis du anbringer en magnet på telefonen, vil dine høreapparater automatisk aktivere telefonprogrammet, når telefonen er tæt på øret. Når du fjerner telefonen fra øret, skifter høreapparaterne automatisk til det forrige lytteprogram.



**NOTE:** Bed din høreapparatspecialist om at aktivere Phone Now som et af dine programmer..



## Anbring Phone Now magneten

Placer magneten på din telefon, for at Phone Now kan benyttes. Sådan placerer du magneten korrekt:

1. Rengør telefonen grundigt

2. Fjern folien fra magneten

3. Anbring magneten

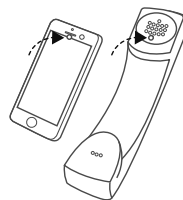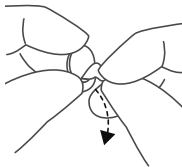

**NOTE:** Hvis du ikke er tilfreds med styrken af Phone Now, kan du prøve at placere magneten et andet sted eller bruge flere magneter.

Anvend et anbefalet rengøringsmiddel til rengøring af telefonen eller mobiltelefonen, før magneten sættes på.

## Sådan bruges Phone Now

1. Hold telefonen op til øret.

2. Når du hører en kort melodi, er telefonprogrammet aktivt.



**NOTE:** Det kan være nødvendigt at flytte røret lidt for at finde den bedste position for pålidelig aktivering af Phone Now og en god høreoplevelse på telefonen.

Hvis funktionen Comfort Phone er aktiveret på høreapparaterne, skrues der automatisk ned for høreapparatet på det øre, hvor telefonen ikke er.

Bed din høreapparatspecialist om at aktivere Phone Now som et af dine programmer.

Du må ikke dække højttaleråbningen med magneten.

Hvis programmet ikke fungerer optimalt, kan det være nødvendigt at flytte magneten til en anden position for at øge brugervenligheden og bekvemmeligheden, når du taler i telefon.

Hvis høreapparaterne ikke skifter til telefonprogrammet hver gang, kan du anbringe magneten et andet sted eller bruge flere magneter.

Brug et anbefalet rengøringsmiddel.



## **Phone Now advarsler**

- Hvis en magnet sluges, skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.
- Det er vigtigt, at du opbevarer magneterne utilgængeligt for børn, dyr og personer med nedsatte mentale evner.
- Magnetten kan påvirke visse medicinske enheder eller elektroniske systemer. Producenter af magnetisk følsomme enheder (fx pacemakere) skal angive de nødvendige sikkerhedsforholdsregler, du skal træffe, når du anvender dit høreapparat og magneten i nærheden af den pågældende medicinske enhed eller det elektroniske system. Hvis producenten ikke har udstedt en erklæring, anbefaler vi, at magneten eller et


telefonrør, der er udstyret med en magnet, holdes mindst 30 cm fra magnetfølsomme enheder (f.eks. pacemakere).

## **Phone Now forholdsregler**

- Hvis du oplever tab af frekvenssignaler eller støj under opkald, kan du prøve at flytte magneten til et andet sted på telefonrøret.
- Anvend kun magneter leveret af producenten.

## **Flytilstand (ekstraudstyr)**

Dit høreapparat giver dig mulighed for at styre det via din smartphone eller fjernbetjening. Du vil dog i nogle områder blive bedt om at slå trådløs kommunikation fra.

 **FORSIGTIG:** Når du går om bord på et fly eller går ind i et område, hvor RF-sendere ikke er tilladt, skal den trådløse funktionalitet deaktiveres.

Benyt denne fremgangsmåde for at aktivere flytilstand:

1. Sluk for høreapparatet.
2. Tryk på knappen i 9 sekunder.
3. Høreapparatet svarer ved at blinke dobbelt fire gange. Hvis du har dine høreapparater på, vil du høre dobbelte bip (♪♪♪♪ osv.) i ti sekunder.



**NOTE:** Begge høreapparater skal stilles i flytilstand – også selv om synkronisering er aktiveret.

**Benyt denne fremgangsmåde for at deaktivere flytilstand:**

1. Sluk for høreapparatet, og tænd det derefter igen.

# Sådan rengør og vedligeholder du dine høreapparater

## Vedligeholdelse og rengøring

Følg instruktionerne nedenfor for at få den bedste oplevelse og forlænge dit høreapparats levetid.

1. Hold dine høreapparater tørre og rene.
2. Tør høreapparaterne af med en blød klud efter brug for at fjerne fugt og snavs.
3. Du må ikke have høreapparaterne på, når du tager kosmetik, parfume, aftershave, hårspray, solcreme osv. på. Det kan misfarve høreapparaterne eller trænge ind i høreapparaterne og beskadige dem.
4. Høreapparaterne må ikke nedsænkes i nogen former for væske.
5. Hold høreapparaterne væk fra varme og direkte sollys. Varmen kan gøre skallen deform, beskadige elektronikken og ødelægge overfladen.
6. Du må ikke svømme eller tage bad eller dampbad med høreapparaterne på.

## Daglig vedligeholdelse

Det er vigtigt at holde høreapparatet rent og tørt. Rengør høreapparatet dagligt vha. en blød klud eller serviet. Det anbefales, at du benytter en fugtjern for at undgå beskadigelser som følge af fugtighed eller overdreven transpiration.

Hvis mikrofonindgangene er tilstoppede, skal du børste forsigtigt over mikrofonindgangene med en lille ren børste.







**ADVARSEL:** Du må ikke trykke den lille børste hårdt ned i indgangene, da det kan beskadige mikrofonerne.



**FORSIGTIG:** Brug ikke alkohol eller opløsningsmidler til rengøring, da det kan beskadige den beskyttende belægning.

## Rengøring af øreproppen

Brug en blød, tør klud til at tørre øreproppen ren med.

## Rengøring af receiverledningen og kuplen

Receiverledningen og kuplen skal rengøres regelmæssigt.

Brug en fugtig klud til at rengøre receiverledningen og kuplen på ydersiden.





**NOTE:** Brug ikke vand, når du rengør receiverledningerne eller -kupperne.

Receiverledningerne kan blive stive, skrøbelige eller misfarvede med tiden. Kontakt din høreapparatspecialist for udskiftning af receiveren.

## Sådan skifter du lydkupler


Følg disse trin for at montere lydkuplerne. I denne procedure vises en åben kuppel, men proceduren er den samme hvis du har en pluskuppel eller en Power kuppel.

1. Skub den nye kuppel ned over den riflede flange på receiveren.
2. Check, at den nye kuppel sidder godt fast.
3. Du kan se, om kuplen sidder korrekt ved at løfte den som vist og tjekke, at begge flanger er dækket af kuplens manchete.

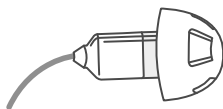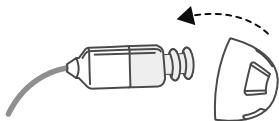


## Sådan skifter du voksfilter


Hvis du bruger en lydskupel, skal du tage den af, før du følger denne fremgangsmåde. For at udskifte voksfiltere:

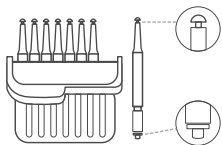

1. Kasse med otte voksfilterværktøjer.

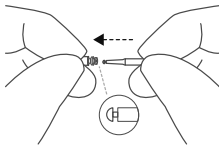


2. Indsæt værktøjets udtagningsspids i det brugte voksfilter, så skaftet rører ved kanten af voksfilteret.

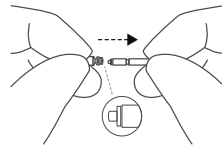


3. Træk langsomt voksfiltret lige ud.


Voksfilterværktøjet har to funktioner: En udtagningsspids til at tage og holde det brugte filter og en erstatningsspids med et hvidt filter. Følg disse trin for at indsætte de nye voksfilter:

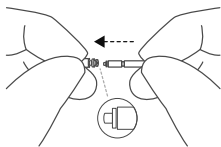

1. Indsæt værktøjets erstatningsspids i høreapparatets lydudgang.

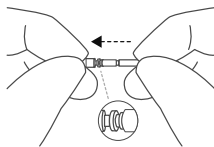

2. Tryk forsigtigt erstatningsspidsen lige ind i lydudgangen, indtil den ydre ring flugter med lydudgangen.

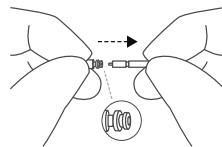

3. Træk værktøjet lige ud – så det nye voksfilter forbliver på plads. Husk at sætte lydakuplen på igen, eller brug en ny lydakupel.

## Sådan rengør du opladeren

1. Rengør ydersiden af opladeren med en tør, ren klud
2. Rengør receiveren og opladningsholderne med en ren vatrondel



**NOTE:** Brug ikke væske til rengøring af høreapparatopladeren.

# Trådløst tilbehør

Det trådløse økosystem består af en omfattende serie af trådløst tilbehør, der integreres helt ubesværet. Tilbehøret giver dig mulighed for at styre og streame stereolyd i høj kvalitet direkte til dine høreapparater.

Du kan se en liste med det tilgængelige trådløse tilbehør nedenfor:

- **TV Streamer 2** giver dig mulighed for at streame lyd fra tv og stort set alle andre lydkilder til dine høreapparater ved en lydstyrke, der passer dig.
- **Remote Control** giver dig mulighed for at justere lydstyrken, slå lyden fra i dine høreapparater og skifte program.
- **Remote Control 2** giver dig mulighed for at justere lydstyrken, slå lyden fra i dine høreapparater og skifte program og se et overblik over indstillingerne på skærmen.
- **Phone Clip+** streamer telefonsamtaler og stereolyd direkte til begge høreapparater og fungerer også som en simpel fjernbetjening.
- **Micro Mic** er en mikrofon, der bæres på kroppen af din ven eller kollega. Den forbedrer taleforståelsen væsentligt i støjende omgivelser.
- **Multi Mic** fungerer på samme måde som **Micro Mic**, men fungerer også som bordmikrofon, kan tilsluttes teleslynge og FM-systemer og har et minijackstik til streaming af lyd fra en computer eller en musikafspiller.



## NOTE:

- Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere oplysninger om udvalget af vores trådløse tilbehør.
- Hvis du vil benytte trådløs funktionalitet, må du kun bruge tilbehør, der understøttes. For yderligere vejledning om pairing henvises til brugsanvisningen til det relevante trådløse tilbehør.

# Tinnitus-håndtering

**R** ONLY (US)

## Tinnitus Sound Generator modulet

Dit høreapparat inkluderer Tinnitus Sound Generator (TSG) modulet. Tinnitus Sound Generator (TSG) modulet er et værktøj, der genererer lyde, som bruges i tinnitusbehandlingsprogrammer til at mildne tinnituslidelsen midlertidigt. TSG genererer lyde, der justeres i overensstemmelse med de specifikke terapeutiske behov, som din læge, audiolog eller høreapparatspecialist har foreskrevet. Du vil nogle gange høre en terapeutisk lyd, der minder om en konstant eller varierende støj, afhængigt af det valgte høreapparatprogram og dine omgivelser.

## Anvendelse af TSG modulet – (kun USA)

Tinnitus Sound Generator modulet er et værktøj til at generere lyde, der skal anvendes som led i et tinnitusbehandlingsprogram til at give midlertidig lindring hos patienter, der lider af tinnitus. Målgruppen er primært voksne personer over 18 år. Produktet kan også bruges af børn i alderen 5 år og opefter.

Tinnitus Sound Generator modulet er beregnet til sundhedspersonale, som behandler personer, der lider af tinnitus samt af almindelige høresygdomme. Tinnitus Sound Generator modulet skal tilpasses af en høreapparatspecialist i et program til tinnitusbehandling.

## Brugsanvisning til TSG modulet

### Beskrivelse af enheden

Tinnitus Sound Generator (TSG) modulet er et softwareværktøj, der genererer lyde, som bruges i tinnitusbehandlingsprogrammer til at mildne tinnituslidelsen midlertidigt.

## Sådan fungerer apparatet

TSG modulet genererer en frekvens- og amplitudeformet hvid støj. Støjsignalniveauet og frekvenskarakteristikaene kan justeres i overensstemmelse med de specifikke terapeutiske behov, som din læge, høreapparatspecialist eller audiolog har foreskrevet.

Din læge, audiolog eller høreapparatspecialist kan modulere den genererede støj, så den bliver mere behagelig. Den hvide støj kan derfor efterligne f.eks. lyde som bølger, der brydes mod en kyst.

Modulationsniveauet og hastigheden kan også konfigureres efter dine ønsker og behov. En yderligere funktion kan aktiveres af din høreapparatspecialist, som giver dig mulighed for at vælge forhåndsdefinerede lyde, der efterligner naturlige lyde, såsom bølger der brydes eller strømmende vand.

Hvis du har to trådløse høreapparater, som understøtter ear-to-ear synkronisering, kan denne funktion aktiveres af din høreapparatspecialist. Dette får Tinnitus Sound Generator til at synkronisere lyden i begge høreapparater.

Hvis dine tinnitusproblemer kun forstyrrer dig i stille omgivelser, kan din læge, audiolog eller høreapparatspecialist indstille TSG modulet, så det kun er hørbart i sådanne omgivelser. Det overordnede lydniveau kan justeres via en volumenkontrol. Din læge, audiolog eller høreapparatspecialist vil sammen med dig vurdere, om du har brug for en volumenkontrol.

For høreapparater hvor ear-to-ear synkronisering er aktiveret, kan din høreapparatspecialist også aktivere synkroniseret omgivelsesovervågning, så støjniveauet i TSG automatisk justeres samtidig i begge høreapparater, afhængigt af baggrundsstøjniveauet. Eftersom høreapparatet har volumenkontrol, kan det overvåge niveauet af baggrundsstøj, og volumenkontrollen kan samtidig bruges til at justere det genererede lydniveau i begge høreapparater.

## De videnskabelige koncepter, der ligger til grund for lydgeneratoren

TSG modulet beriger lydbilledet med en neutral lyd, der nemt kan ignoreres, med det formål at omkredse tinnituslyden. Lydberigelse er en vigtig komponent i de fleste behandlingstilgange til tinnitus som f.eks. TRT (Tinnitus Retraining Therapy).

Denne form for terapi skal være hørbar for at kunne lindre tinnituslidelsen. Det ideelle niveau for TSG modulet bør derfor indstilles, så det blandes med tinnitussen, således at du både kan høre din tinnitus samt den anvendte lyd.

I de fleste tilfælde kan TSG modulet også indstilles, således at det maskerer tinnituslyden og på den måde lindrer ved at introducere en mere behagelig og kontrollerbar lydkilde.

## TSG volumenkontrol

Lydgeneratoren er angivet til et bestemt lydniveau af høreapparatspecialisten. Når du tænder lydgeneratoren, er volumenkontrollen angivet til det optimale niveau. Derfor er det muligvis ikke nødvendigt at kontrollere lydstyrken manuelt. Der er dog mulighed for at justere lydstyrken eller mængden af stimuli efter ønske. Lydstyrken i tinnitus lydgeneratoren kan kun justeres inden for det interval, som høreapparatspecialisten har angivet.

Volumenkontrollen er en funktion, der fås som tilbehør til TSG modulet, og som bruges til at justere lydstyrken af lydgeneratoren.

## Brug af TSG sammen med smartphone-apps

Betjeningen af lydgeneratoren via høreapparatets trykknapper kan forbedres yderligere med trådløs betjening fra en TSG app på en smartphone eller mobilenhed. Denne funktion er tilgængelig i de høreapparater, som understøtter den, når en høreapparatspecialist har aktiveret TSG funktionen under tilpasning af høreapparatet.





**NOTE:** For at kunne bruge smartphone-apps skal høreapparatet være forbundet med smartphonen eller mobilenheden.

## TSG - Tekniske specifikationer

Lydsignalteknologi: Digital.

Tilgængelige lyde

Signaler med hvid støj kan formes ud fra følgende konfigurationer:

Højpasfilter	Lavpasfilter
500 Hz	2000 Hz
750 Hz	3000 Hz
1000 Hz	4000 Hz
1500 Hz	5000 Hz
2000 Hz	6000 Hz
-	8000 Hz

Signalet med hvid støj kan moduleres i amplitude med en dæmpning på op til 14 dB.



## Brug af et Tinnitus Sound Generator høreapparat i henhold til ordinerings

TSG må bruges efter anvisning fra din læge, audiolog eller høreapparatspecialist. Den maksimale daglige brug – for at undgå permanente høreskader – afhænger af niveauet af den genererede lyd.

Kontakt din høreapparatspecialist for at få justeret TSG.

Hvis der opstår bivirkninger ved brugen af lydgeneratoren som f.eks. svimmelhed, kvalme, hovedpine, mærkbar nedgang i hørefunktionen eller øget tinnitus, skal du stoppe med at bruge den og søge lægehjælp.

Børn og brugere med fysiske eller psykiske handicap skal oplæres af en læge, audiolog, høreapparatspecialist eller en værger for at lære at isætte og fjerne høreapparatet med TSG modulet.

### Vigtig meddelelse til potentielle brugere af lydgenerator

En lydgenerator er en elektronisk enhed, der er beregnet til at generere støj af en tilstrækkelig intensitet og båndbredde for at undertrykke intern støj. Den bruges også som en hjælp til at høre eksternt støj og tale.

God sundhedspraksis kræver, at en person med tinnitus gennemgår en undersøgelse af en ørelæge, inden lydgeneratoren benyttes. Ørelæger, der er specialiseret i øresygdomme, kaldes øre-næse-halslæger.

Formålet med en medicinsk evaluering er at sikre, at alle medicinske tilstande, der kan behandles, og som kan påvirke tinnitusen, bliver identificeret og behandlet, inden lydgeneratoren tages i brug.

Lydgeneratoren er et værktøj til at generere lyde, der bruges sammen med korrekt rådgivning og/eller i et tinnitusbehandlingsforløb til at lindre lidelsen hos personer med tinnitus.



### Tinnitus Sound Generator advarsler

1. Lydgeneratorer må kun bruges efter anvisning fra din læge, audiolog eller høreapparatspecialist.

2. Lydgeneratorer er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for alle (især børn og kæledyr), der kan forårsage skade på sig selv.
3. Lydgeneratorer kan være farlige, hvis de bruges forkert.



### Tinnitus Sound Generator forholdsregler

1. Hvis der opstår bivirkninger ved brugen af lydgeneratoren som f.eks. svimmelhed, kvalme, hovedpine, mærkbar nedgang i hørefunktionen eller øget tinnitus, skal du stoppe med at bruge lydgeneratoren og søge lægehjælp.
2. Stop med at bruge lydgeneratoren, og kontakt din læge med det samme, hvis du oplever en af følgende lidelser:
  - a. Synlig medfødt eller traumatisk deformitet af øret.
  - b. Udflåd fra øret inden for de seneste 90 dage.
  - c. Pludselig eller hurtigt tiltagende hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
  - d. Akut eller kronisk svimmelhed.
  - e. Ensidig hørenedsættelse eller pludselig eller nyere hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
  - f. Synlig og væsentlig mængde af ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
  - g. Smerte eller ubehag i øret.
3. Stop med at bruge lydgeneratoren, og kontakt din høreapparatspecialist med det samme, hvis du oplever ændringer i opfattelsen af tinnitus, ubehag eller ændret taleopfattelse, når du bruger Tinnitus Sound Generator.
4. Volumenkontrollen er en funktion i modulet TSG, der bruges til at justere outputniveauet for lydgeneratoren. For at forhindre utilsigtet brug af børn eller fysisk eller psykisk handicappede brugere, skal volumenkontrollen konfigureres, så det kun er muligt at skrue ned for lydstyrken.

5. Børn og fysisk eller psykisk handicappede brugere skal overvåges, når de bruger TSG høreapparatet.
6. Justering af indstillingerne for Tinnitus Sound Generator ved hjælp af en smartphone-app må kun foretages af en forælder eller værge, hvis der er tale om en mindreårig bruger. Brug af Online Services til fjernindstillinger af tinnituslydgeneratoren må kun foretages af en forælder eller en værge, hvis der er tale om en mindreårig bruger.



### Tinnitus Sound Generator advarsel til høreapparatspecialister

Høreapparatspecialisten skal råde den potentielle bruger af lydgeneratoren til med det samme at opsøge læge (helst en øre-, næse-, halslæge), inden beslutningen om at anskaffe en lydgenerator træffes.

Hvis høreapparatspecialisten gennem spørgsmål, faktiske observationer eller gennemgang af enhver anden form for oplysninger om den potentielle bruger fastslår, at brugeren har en af følgende tilstande:

1. Synlig medfødt eller traumatisk deformitet af øret.
2. Udflåd fra øret inden for de seneste 90 dage.
3. Pludselig eller hurtigt tiltagende hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
4. Akut eller kronisk svimmelhed.
5. Ensidig hørenedsættelse eller pludselig eller nyere hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
6. Audiometrisk air-bone gap lig med eller større end 15 dB ved 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz og 2.000 Hz.
7. Synlig og væsentlig mængde af ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
8. Smerte eller ubehag i øret.



**FORSIGTIG:** Det maksimale output fra lydgeneratoren ligger inden for det område, der kan forårsage hørenedsættelse iht. OSHA-regulativerne. I henhold til anvisninger fra NIOSH bør brugeren ikke bruge

lydgeneratoren i mere end otte (8) timer om dagen, når denne er indstillet til et niveau på 85 dB SPL eller derover. Brugeren bør ikke bruge lydgeneratoren i mere end to (2) timer om dagen, når den er indstillet til 90 dB SPL eller derover. Lydgeneratoren må under ingen omstændigheder benyttes ved ubehagelige niveauer.

## **Generelle advarsler**

1. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du opdager et fremmedlegeme i din øregang, hvis du oplever hudirritation, eller hvis der akkumuleres for meget ørevoks, når du bruger høreapparatet.
2. Forskellige former for stråling, f.eks. fra NMR-, MR- eller CT-scannere, kan beskadige høreapparatet. Det anbefales, at du ikke benytter høreapparatet under disse eller lignende procedurer. Andre typer stråling, f.eks. tyverialarmer, overvågningssystemer, radioudstyr, mobiletelefoner, indeholder mindre energi og beskadiger ikke høreapparatet. De kan dog midlertidigt påvirke lyd kvaliteten eller forårsage uønskede lyde i høreapparaterne.
3. Høreapparatet må ikke benyttes i miner, oliefelter eller andre områder med eksplosionsfare, med mindre disse områder er certificeret som områder, der er egnet til brug af høreapparater.
4. Andre personer må ikke benytte dit høreapparat.
5. Børn eller personer med nedsatte mentale evner, der benytter høreapparat, skal altid overvåges for at garantere deres sikkerhed. Høreapparatet indeholder små dele, som børn kan sluge. Husk ikke at efterlade børn sammen med høreapparatet uden opsyn.
6. Høreapparatet må kun benyttes som foreskrevet af din høreapparatspecialist. Forkert brug kan resultere i pludselig og permanent hørenedsættelse.
7. Advarsel til høreapparatspecialister: Du skal være særlig forsigtig, når du vælger og tilpasser høreapparater med et maksimalt lydtryksniveau, der overstiger 132 dB SPL i en okkluderet IEC 60711:1981-øresimulator. Der kan være risiko for forringelse af den resterende hørelse.
8. Deaktiver den trådløse funktionalitet ved at bruge flytilstanden i områder, hvor udsendelse af radiofrekvens er forbudt.
9. Hvis høreapparatet er i stykker, må det ikke benyttes.

10. Eksterne enheder forbundet til den elektriske indgang skal være sikre i henhold til kravene i IEC 60601-1, IEC 60065, EN/IEC 62368-1 eller IEC 60950-1, hvor det er relevant (fast forbindelse, f.eks. HI-PRO eller SpeedLink).



**NOTE:**

Hvis du vil benytte trådløs funktionalitet, må du kun bruge tilbehør, der understøttes. Du kan få flere oplysninger om f.eks. parring i brugsanvisningen til det relevante trådløse tilbehør.



## **Generelle forholdsregler**

1. Når den trådløse funktion er aktiveret, bruger apparatet digitalt kodede transmissioner med lav effekt til at kommunikere med andre trådløse enheder. Elektroniske apparater i umiddelbar nærhed kan blive påvirket, selvom det er usandsynligt. Hvis dette sker, skal du fjerne høreapparatet fra det påvirkede elektroniske apparat.
2. Brug kun originale dele fra producenten, f.eks. voksfiltre.
3. Høreapparaterne må kun tilsluttes tilbehør, der er beregnet og kvalificeret til brug sammen med dine høreapparater.

## **Forventninger til høreapparatet**

- Et høreapparat giver dig ikke normal hørelse og vil ikke forhindre eller forbedre et hørehandicap, som skyldes naturlige årsager.
- Konsekvent brug af høreapparatet anbefales. I de fleste tilfælde opnår du ikke det fulde udbytte, hvis høreapparatet bruges inkonsekvent.

- Brugen af et høreapparat er kun en del af rehabiliteringen af hørelsen og skal muligvis suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflysning.



# Fejlfinding

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Mulig løsning</b>
Hyletoner, "tilbagekobling"	Er øreproppen eller lydakuplen indsat korrekt i øret?	Sæt den i igen.
	Er lydstyrken meget høj?	Skru ned for lyden.
	Er receiverledningen i stykker eller er øreproppen tilstoppet?	Udskift eller kontakt din høreapparatspecialist.
	Holder du en genstand (f.eks. en hat eller et telefonrør) tæt på apparatet?	Flyt din hånd væk for at skabe noget mere plads mellem høreapparatet og genstanden.
	Er dit øre fuldt af voks?	Kontakt din ørelæge.
Ingen lyd	Er høreapparatet tændt?	Tænd for det.
	Er høreapparatet opladet?	Sæt høreapparatet i opladeren til opladning.
	Er høreapparatopladeren opladet?	Sæt opladeren i en stikkontakt og sæt opladningskablet i høreapparatopladeren.
	Er receiverledningen i stykker eller er øreproppen tilstoppet?	Kontakt din høreapparatspecialist.
	Er dit øre fuldt af voks?	Kontakt din ørelæge.
Er lyden forvrænget,	Er receiverledningen i stykker eller er	Kontakt din høreapparatspecialist.

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Mulig løsning</b>
spruttende eller svag?	øreproppen tilstoppet?	
	Er dit høreapparat blevet fugtigt?	Tør høreapparaterne med en tør klud og lad dem tørre.
Batteriet aflader meget hurtigt	Lod du høreapparatet være tændt i lang tid?	Sluk for høreapparatet, når du ikke bruger det.
	Er høreapparatet gammelt?	Kontakt din høreapparatspecialist.
Høreapparatet oplader ikke	Er høreapparatet placeret korrekt i opladeren?	Sæt høreapparatet i opladeren igen.
	Er høreapparatopladeren opladet?	Sæt opladeren i en stikkontakt og sæt opladningskablet i høreapparatopladeren.

## Ofte stillede spørgsmål om genopladelige batterier

Spørgsmål	Svar
Hvordan skal jeg klargøre et nyt batteri?	I en normal brugssituation er det ikke nødvendigt med klargøring. Du skal blot lade dine høreapparater op som beskrevet i denne brugsanvisning
Kan jeg beskadige et batteri ved forkert brug?	Kun hvis du udsætter det for ekstreme temperaturer eller overdreven fysisk kraft
Skal jeg tage høreapparaterne ud, når de er fuldt opladet?	Nej
Må jeg forstyrre opladningen af høreapparaterne og høreapparatopladeren?	Ja
Skal jeg bruge batteriet helt op, før jeg oplader det igen?	Nej

Spørgsmål	Svar
<p>Hvorfor tænder mine høreapparater ikke automatisk, selvom de har været i opladeren i længere tid?</p>	<p>Hvis du lader dine høreapparater være i opladeren i længere end 24 timer, går opladeren i standbytilstand, og høreapparaterne slukkes. Hvis opladeren* løber tør for batteri, giver den høreapparaterne besked om at slukke for strømmen for at spare på energien. Når du tager høreapparaterne ud af opladeren, tændes de ikke som normalt. Tryk på knappen i 5 sekunder for at tænde høreapparaterne manuelt. *: Kun Premium opladeren</p>
<p>Bliver batteriet varmt under opladningen?</p>	<p>Der opstår en mindre temperaturstigning, når opladningen er ved at være færdig.</p>
<p>Kan jeg oplade ved lave temperaturer?</p>	<p>Hvis høreapparatet er under 0 °C (32 °F), vil det ikke oplade med det samme. Opladningen skal finde sted mellem 0 °C (32 °F) og 40 °C (104 °F)</p>
<p>Kan jeg oplade ved høje temperaturer?</p>	<p>Driftsområdet for opladeren og høreapparaterne er 0 °C (+32 °F) til +40 °C (+104 °F)</p>

## **Advarsler til høreapparatspecialister (kun USA)**

En høreapparatspecialist bør råde en potentiel høreapparaturbruger til at opsøge en ørelæge, før et høreapparat sælges, hvis høreapparatspecialisten gennem observation eller gennemgang af tilgængelige oplysninger angående den potentielle bruger, registrerer, at den potentielle bruger har en af følgende lidelser:

1. Synlig medfødt eller traumatisk deformitet af øret.
2. Udflåd fra øret inden for de seneste 90 dage.
3. Pludselig eller hurtigt tiltagende hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
4. Akut eller kronisk svimmelhed.
5. Ensidig hørenedsættelse eller pludselig eller nyere hørenedsættelse inden for de seneste 90 dage.
6. Audiometrisk air-bone gap lig med eller større end 15 dB ved 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz og 2.000 Hz.
7. Synlig og væsentlig mængde af ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
8. Smerte eller ubehag i øret.

## **Vigtig meddelelse til potentielle høreapparaturbrugere (kun USA)**

God sundhedspraksis kræver, at en person med hørenedsættelse gennemgår en undersøgelse af en ørelæge, inden der investeres i et høreapparat. Ørelæger, der er specialiseret i øresygdomme, kaldes øre-næse-halslæger. Formålet med en medicinsk evaluering er at sikre, at alle medicinske tilstande, der kan behandles, og som kan påvirke hørelsen, bliver identificeret og behandlet, inden høreapparatet købes.

Efter den medicinske vurdering vil lægen give dig en henvisning, der angiver, at dit høretab er blevet lægeligt vurderet, og at du kan betragtes som kandidat til et høreapparat. Lægen vil henvise dig til en egnet audiolog eller høreapparatspecialist, så du kan få foretaget en høreapparatvurdering.

Audiologen eller høreapparatspecialisten vil udføre en høreapparatvurdering for at vurdere din evne til at høre med og uden et høreapparat. Høreapparatvurderingen vil sætte audiologen eller høreapparatspecialisten i stand til at vælge og tilpasse et høreapparat, der passer til dine individuelle behov.

Hvis du er i tvivl om din evne til at vænne dig til forstærkning, bør du spørge om muligheden for et prøve-leje eller køb-optionsprogram. Mange høreapparatspecialister tilbyder nu programmer, der lader dig prøve et høreapparat i en periode for et symbolsk beløb, hvorefter du kan beslutte, om du ønsker at købe høreapparatet.

Føderal lovgivning begrænser salget af høreapparater til personer, der har fået foretaget en medicinsk vurdering af en autoriseret læge. Føderal lovgivning tillader, at en fuldt informeret voksen underskriver en dispensationserklæring om, at han eller hun fraskriver sig en medicinsk vurdering af religiøse eller personlige årsager, som udelukker samråd med en læge. Anvendelsen af en sådan dispensationserklæring er ikke i din bedste helbredsmæssige interesse, og dens anvendelse frarådes kraftigt.



### **Børn med hørenedsættelse (kun USA)**

Ud over at se en læge for en lægelig vurdering, bør et barn med hørenedsættelse henvises til en høreapparatspecialist til evaluering og rehabilitering, da hørenedsættelse kan forårsage problemer i den sproglige udvikling og barnets uddannelsesmæssige og sociale vækst. En høreapparatspecialist er kvalificeret gennem uddannelse og erfaring til at bistå med evaluering og rehabilitering af et barn med hørenedsættelse.

# Regulatoriske oplysninger

## Garantier og reparation

Alle høreapparater fra producenten er dækket af en garanti, der dækker defekter i materialer og fremstilling, som beskrevet i gældende garantidokumentation. I sin servicepolitik lover producenten at sikre funktionalitet, så det svarer til det originale høreapparat. Som underskriver af FN's Global Compact Initiative er producenten forpligtet til at gøre dette på den mest miljøbevidste måde. Høreapparater kan derfor efter producentens eget skøn blive udskiftet med nye produkter eller produkter, der er fremstillet af nye eller brugte dele, eller repareret med nye eller istandsatte dele. Du kan få oplyst garantiperioden hos din høreapparatspecialist eller hos GN Hearing Danmark.

Hvis dit høreapparat kræver service, skal du kontakte din høreapparatspecialist for at få hjælp.

Høreapparater, der ikke fungerer, skal repareres af en kvalificeret tekniker. Forsøg ikke at åbne for høreapparatet, da dette medfører, at garantien bortfalder.

## Oplysninger om temperaturtest, transport og opbevaring

Vores høreapparater er testet under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold på mellem  $-25\text{ °C}$  ( $-13\text{ °F}$ ) og  $+70\text{ °C}$  ( $+158\text{ °F}$ ) i henhold til interne og branchespecifikke standarder.

Under normal drift bør temperaturen ikke overstige grænseværdierne på  $0\text{ °C}$  ( $+32\text{ °F}$ ) til  $+45\text{ °C}$  ( $+113\text{ °F}$ ) ved en relativ luftfugtighed på 90 %, ikke-kondenserende. Et lufttryk på mellem 500 hPa og 1100 hPa er passende.

Under transport eller opbevaring bør temperaturen ikke overstige grænseværdierne på  $-20\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$ ) til  $+60\text{ °C}$  ( $+140\text{ °F}$ ) og en relativ luftfugtighed på 90 % RH, ikke-kondenserende (i begrænset tid). Et lufttryk på mellem 500 hPa og 1100 hPa er passende.

## Erklæring

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC- og ISED-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke fremkalde skadelig interferens.
2. Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan fremkalde uønskede fejl.



**NOTE:** Produktet er testet og efterkommer begrænsningerne for digitalt udstyr i klasse B i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er lavet for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette produkt skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi, og det kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Imidlertid er der ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis produktet forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for produktet, kan du prøve at afhjælpe problemet på en eller flere af følgende måder:

- Genindstil eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem produktet og modtageren
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet
- Kontakt din forhandler eller en autoriseret radio/tv-tekniker.

Ændringer eller modifikationer kan annullere brugerens bemyndigelse til at betjene dette udstyr.



## Produkterne overholder følgende regulative krav:

- I EU: Apparatet overholder de grundlæggende krav i bilag I til Rådets Direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr (MDD).
- GN Hearing A/S erklærer hermed, at radioudstyrstyperne LXR45 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
- Den fulde tekst for EU's overensstemmelseserklæring fås på følgende internetadresse: [www.declarations.resound.com](http://www.declarations.resound.com).
- I USA: FCC CFR 47 Part 15, subpart C.
- Andre gældende internationale krav i lande uden for EU og USA. Se venligst lokale regler for disse områder.
- I Canada: Disse høreapparater er certificeret under ISED-reglerne.
- I overensstemmelse med Japanese Radio Law og Japanese Telecommunications Business Law. Enheden er certificeret i henhold til Japanese Radio Law (電波法) og Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法). Denne enhed må ikke ændres (i modsat fald bliver det tildelte betegnelsesnummer ugyldigt).

## Typebetegnelser

Der er følgende typebetegnelser for høreapparatmodeller i denne brugsanvisning:

**LXR45**, FCC ID: X26LXR45, IC: 6941C-LXR45.

Dette produkt omfatter en RF-sender, der fungerer inden for frekvensbåndet 2,4 GHz-2,48 GHz.

## Symboler



**ADVARSEL:** Påpeger en situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser.



Juridisk producent.



**FORSIGTIG:** Angiver en situation, der kan føre til mindre og moderate skader.



**NOTE:** Råd og tip til, hvordan du bedst muligt håndterer dit høreapparat.



Kun på recept (USA).



Følg brugsanvisningen.



Overholder ACMA-kravene.



Udstyret omfatter en RF-sender.



Overholder IMDA-kravene.



Produktet er en anvendt del af type B.



Unik udstyrsidentifikation.



Fremstillingsdato.



Høreapparaterne og batterierne må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Høreapparaterne og batterierne skal bortskaffes på steder, der er beregnet til elektronisk affald, eller returneres til din høreapparatsspecialist for sikker bortskaffelse.

Spørg din lokale høreapparatsspecialist til råds om bortskaffelse af høreapparatet.

NOTE: Der kan være særlige regulativer i dit land.

# Tekniske specifikationer


## RIE - LP-receiver

Modeller:XA961-DRWC, XA761-DRWC, XA561-DRWC.

Forstærkning i referencetest (60 dB SPL input)	HFA	32	dB
Fuld forstærkning (50 dB SPL input)	Maks. HFA.	52 46	dB
Maksimum output (90 dB SPL input)	Maks. HFA	113 109	dB SPL
Samlet harmonisk forvrængning	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,5 0,8 0,5	%
Telespolefølsomhed (1 mA/m input)* HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) Full-on telespolefølsomhed @ 1mA/m	Maks. HFA HFA	82 91 76	dB SPL
Ækvivalent inputstøj uden støjreduktion		21	dB SPL
1/3 oktav tilsvarende inputstøj uden støjreduktion	1600 Hz	9	dB SPL
Frekvensinterval IEC 60118-0: 2015		100-9060	Hz
Forventet driftstid*		30	Timer

Data i overensstemmelse med ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015.


\*Den forventede driftstid for det genopladelige batteri afhænger af de aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, hørenedsættelsen, batteriets alder og lyd miljøet.

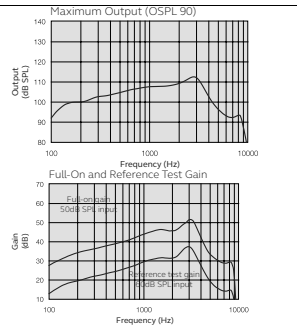

# RIE - MP-receiver

Modeller: XA961-DRWC, XA761-DRWC, XA561-DRWC.

Forstærkning i referencetest (60 dB SPL input)	HFA	36	dB
Fuld forstærkning (50 dB SPL input)	Maks. HFA.	58 50	dB
Maksimum output (90 dB SPL input)	Maks. HFA	116 113	dB SPL
Samlet harmonisk forvrængning	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,3 0,4 0,7	%
Telespolefølsomhed (1 mA/m input)* HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) Full-on telespolefølsomhed @ 1mA/m	Maks. HFA HFA	86 96 81	dB SPL
Ækvivalent inputstøj uden støjreduktion		24	dB SPL
1/3 oktav tilsvarende inputstøj uden støjreduktion	1600 Hz	11	dB SPL
Frekvensinterval IEC 60118-0: 2015		100-9000	Hz
Forventet driftstid*		30	Timer

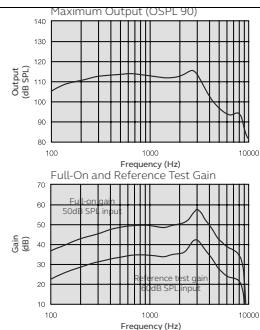


Data i overensstemmelse med ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015

\*Den forventede driftstid for det genopladelige batteri afhænger af de aktive funktioner, brugen af trådløst tilbehør, hørenedsættelsen, batteriets alder og lyd miljøet.

# RIE - HP-receiver

Modeller: XA961-DRWC, XA761-DRWC, XA561-DRWC.

Forstærkning i referencetest (60 dB SPL input)	HFA	40	dB
Fuld forstærkning (50 dB SPL input)	Maks. HFA.	65 57	dB
Maksimum output (90 dB SPL input)	Maks. HFA	120 117	dB SPL
Samlet harmonisk forvrængning	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,3 0,7 0,5	%
Telespolefølsomhed (1 mA/m input)* HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) Full-on telespolefølsomhed @ 1mA/m	Maks. HFA HFA	95 100 89	dB SPL
Ækvivalent inputstøj uden støjrreduktion		22	dB SPL
1/3 oktav tilsvarende inputstøj uden støjrreduktion	1600 Hz	10	dB SPL
Frekvensinterval IEC 60118-0: 2015		100-6750	Hz
Forventet driftstid*		30	Timer

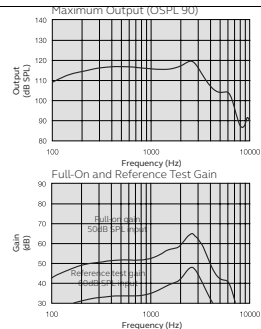


Data i overensstemmelse med ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015.

\*Expected operating time of the rechargeable battery depends on active features, the use of wireless accessories, hearing loss, battery age and sound environment.

# RIE - UP-receiver

Modeller: XA961-DRWC, XA761-DRWC, XA561-DRWC.

Forstærkning i referencetest (60 dB SPL input)	HFA	47	dB
Fuld forstærkning (50 dB SPL input)	Maks. HFA.	75 65	dB
Maksimum output (90 dB SPL input)	Maks. HFA	128 124	dB SPL
Samlet harmonisk forvrængning	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	1,0 1,6 0,1	%
Telespolefølsomhed (1 mA/m input)* HFA – SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI) Full-on telespolefølsomhed @ 1mA/m	Maks. HFA HFA	105 108 96	dB SPL
Ækvivalent inputstøj uden støjreduktion		23	dB SPL
1/3 oktav tilsvarende inputstøj uden støjreduktion	1600 Hz	9	dB SPL
Frekvensinterval IEC 60118-0: 2015		130-4920	Hz
Forventet driftstid*		30	Timer

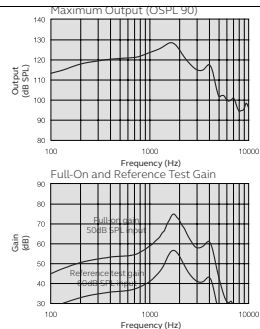

Data i overensstemmelse med ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015.

\*Expected operating time of the rechargeable battery depends on active features, the use of wireless accessories, hearing loss, battery age and sound environment.

# Varianter af høreapparater

**Mini Receiver In-the-Ear (RIE)** høreapparater af typen LXR45 med FCC ID X26LXR45, IC-nummer 6941C-LXR45 fås i følgende varianter:

XA961-DRWC, XA761-DRWC, XA561-DRWC.

## **Hearing aid charger:**

Model: C-1

Den nominelle RF-udgangseffekt er: +0.82 dBm

# Ekstra oplysninger

## Kildeangivelse

Dele af denne software er skrevet af Kenneth MacKay (micro-ecc) og givet i licens under følgende vilkår og betingelser:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Alle rettigheder forbeholdes.

Videregistribution og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videregistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videregistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller i andre materialer, der følger med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE "SOM DEN ER" OG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. COPYRIGHTINDEHAVEREN ELLER BIDRAGSYDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER LØSELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER; TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG UANSET ANSVARSTEORI, DET VÆRE SIG INDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (INKLUSIVE



FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER MÅTTE VÆRE BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.



**NOTE:** Brug af Made for Apple logoet betyder, at tilbehøret er blevet designet specifikt med henblik på at kunne oprette forbindelse til iPhone, iPad og iPod modeller, og at udvikleren har certificeret, at det lever op til Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

© 2022 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker, der tilhører Google LLC. Bluetooth ordmærket og logoer er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.

# Notater

# Notater

Producent i henhold til EU's direktiv om  
medicinsk udstyr 93/42/EØF:



GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark

**CE**  
0297

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med apparatet, skal rapporteres til den juridiske producent GN Hearing A/S og den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor brugeren er etableret.