

ReSound Remote Control



Descrizione Prodotto

ReSound Remote Control è la scelta ideale per i clienti che ricercano il controllo facile e discreto dei propri apparecchi acustici.

Possono cambiare i programmi e regolare il volume senza guardare, grazie ai pulsanti grandi, concavi ed ergonomici che facilitano la presa. I pulsanti hanno i simboli in rilievo al centro, quindi sono facili da localizzare e far scorrere il dito sopra. Questo è ideale per chi ha difficoltà ad usare i pulsanti degli apparecchi acustici.

ReSound Remote Control è piccolo e maneggevole, con un design elegante. L'accessorio può essere tenuto comodamente in tasca o in borsa, si mimetizza con gli altri oggetti se riposto sulla scrivania.

FACILE DA COLLEGARE

- Per accoppiare un apparecchio acustico, premere il pulsante di associazione sul retro del telecomando ReSound e aprire e chiudere lo sportello della batteria dell'apparecchio acustico entro 20 secondi.

FACILE DA USARE

- Puoi cambiare i programmi del tuo apparecchio acustico premendo il pulsante delle impostazioni.
- Puoi regolare il tuo apparecchio acustico con il pulsante + e -
- La batteria bottone al litio standard CR2032 è ampiamente disponibile e facile da sostituire.

DATI TECNICI	
Dimensioni	73 x 35 x 14 mm
Peso	22,5 g
Alimentazione	CR2032 batteria bottone al litio
Connessioni wireless	2 apparecchi acustici per Remote Control 2
Frequenza wireless	2,4 GHz
Raggio di azione wireless	approssimativamente un metro
Velocità di comunicazione	2 Mbit/s
Emissione	Max. +4 dBm, in conformità con tutti gli standard in materia
Immunità ESD	+/- 4 kV di contatto. +/- 8 kV di aria
Temperatura di funzionamento	Da 0 a +55 °C / +32 a +131 °F
Temperatura di conservazione	Da -20 a +60 °C / -4 a +140 °F

Sede Centrale Internazionale
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danimarca
Tel.: +45 4575 1111
resound.com
CVR no. 55082715

Italia
GN Hearing S.r.l.
Via Nino Bixio, 1/B
IT-35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel.: +39 049 8911 511
Fax: +39 049 8911 450
info@gnhearing.it
resound.com/it-it

Svizzera
GN Hearing Switzerland AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tel.: +41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch